





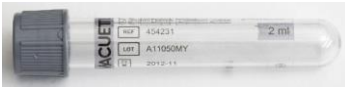




Rekommenderad ordningsföljd vid venprovtagning (KK)

Nedanstående ordningsföljd ska följas för att minska risken för kontamination från backventilen vid rörbyte mellan rör med olika tillsatser.

Alla rör har en tillsats och skall blandas 5-10 ggr omedelbart i samband med provtagning.

1		Ljusblå kork Na-Citrat <i>Markering anger minsta fyllnad!</i>
2		Röd kork Guldgul kork Koagulationsaktivator utan eller med gel
3		Mörkgrön kork Grön kork Li-Heparin utan eller med gel
4		Lila kork EDTA
5		Pärlemorfärgad kork EDTA med gel
6		Rosa kork FC Mix NaFlourid/EDTA/Citrat
7		Grå kork Na-Fluorid/K-Oxalat
8	 <small>Blodtätningflaska AcroB för blodtätning</small>	 <small>Blodtätningflaska AvionB för blodtätning</small>